

ASSORBITORE GAS ESAUSTI



Assorbitore a carbone attivo, utilizzato per l'assorbimento dei gas anestetici organici come Isoflurano, Sevoflurano e Alotano.

Questo sistema non è adatto per il protossido di azoto perché non viene assorbito dal carbone.

E' necessario monitorare il peso dell'assorbitore perché **quando raggiunge i 1400gr deve essere sostituito**, altrimenti se eccede, diventa saturo e i gas di scarico vengono rilasciati nell'ambiente di lavoro.

L'assorbitore viene fornito col suo connettore di 22mm maschio e tubo di scarico.