
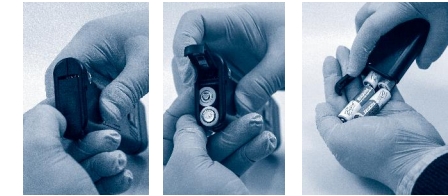
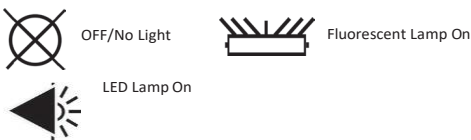


LAMPADA DI WOOD TASCABILE

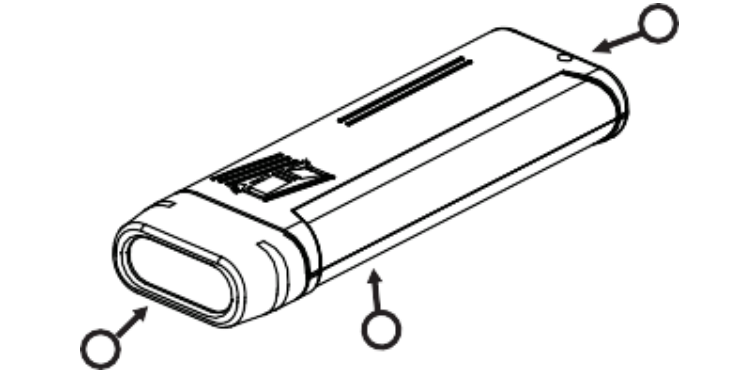

WOOD'S LIGHT **IT**
REF|UV59

ATTENZIONE:
Evitare l'esposizione visiva diretta prolungata.

- SPECIFICHE:**
- Lampada fluorescente, sostituibile (REF UV59B) – circa 365 nm
 - Lampada a LED (diodo a emissione di luce), non sostituibile
 - Alimentazione – 6V (4 batterie AA

sostituibili) Uso medico

previsto/Indicazione d'uso
La Wood's Light a luce UV è una lampada portatile palmare e leggera, a batterie, in grado di emettere, come opzione, luce ultravioletta.

Principio di funzionamento
Utilizzata per la visualizzazione diagnostica e il rilevamento del liquido seminale.

Popolazione di pazienti Non limitata

Punto d'uso e condizioni del sito
Punto d'uso – Pelle
Condizioni del sito – Non limitate

Profilo utente di destinazione
Il dispositivo è destinato all'uso da parte di professionisti sanitari addestrati.

Condizioni d'uso previsto

- Ambiente
- Funzionalità limitata in presenza di umidità
 - Visione chiara e priva di ostruzioni del punto di

applicazione Frequenza d'uso
Nessuna limitazione della durata della batteria o della lampada

- Smaltimento**
- Lampada fluorescente – Eliminare la lampada nel rispetto delle linee guida per lo smaltimento delle lampade fluorescenti
 - Rischio biologico – Smaltire la luce UV secondo il protocollo della struttura ospedaliera

ISTRUZIONI:
RIMUOVERE il nastro PROTETTIVO in plastica per accedere all'interruttore della Wood's Light.


ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA FLUORESCENTE
Schiacciare e far scorrere entrambe le estremità del coperchio della lampada (B) per rimuoverlo.

Rimuovere la lampadina a fluorescenza ruotandola di 90 gradi e sollevandola. Sostituire la lampadina. Reinserire e far scattare in posizione il (B) coperchio della lampada.

NOTA: La Lampada a LED (A) non è sostituibile.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
Far scorrere il coperchio del vano batteria per aprirlo (C). Rimuovere tutte le 4 batterie. Sostituire le batterie osservando la polarità

R_x ONLY

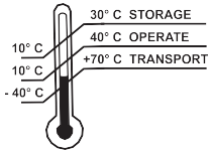

STORAGE
10 to 75 % non-condensing
OPERATE
30 to 75 % non-condensing
TRANSPORT
10 to 100 % including condensation

Bovie
Bovie Medical Corporation
5115 Ulmerton Road
Clearwater, Florida 33760 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands



WOODS LIGHT

MC-18989 Rev. 7

REF|UV59

2018-06-04